


PODER PARA REPARAR SIN DEJAR HUELLA

GUÍA DE PREPARACIÓN

La preparación cuidadosa de **genex** y **genex ds** lleva tan sólo unos minutos. Debe utilizar la solución de mezcla que se proporciona. No añada ninguna otra sustancia a la pasta.


genex

1

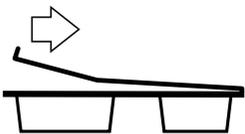


Abra el envase y saque todos los componentes utilizando una técnica aséptica de "no tocar"

2

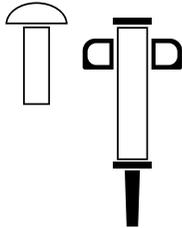

Retire el émbolo de la jeringuilla y póngalo a un lado

3

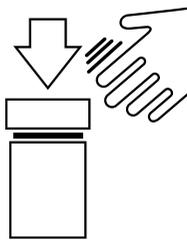


Golpee el recipiente suavemente, retire la tapa y vacíe el polvo en un bol de mezclar estéril

4




Añada la solución esterilizada y previamente medida a los polvos. Deje reposar (en remojo) durante 1 minuto

5

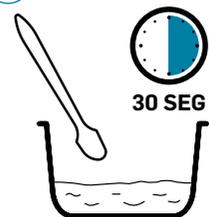


Mezcle cuidadosamente hasta que la pasta sea homogénea (Aprox. 30 segundos). No mezcle más del tiempo indicado

6

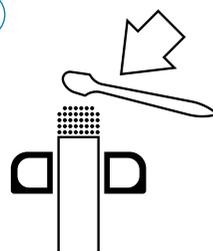

Utilice una espátula para presionar la pasta en la jeringuilla lo antes posible

7

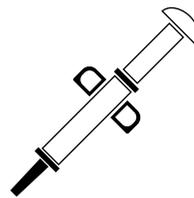

genex está listo para usar

8



5 MINUTOS


El injerto óseo **genex** es inyectable hasta 5 minutos desde la adición de la solución de mezcla. Permita que fragüe por lo menos 15 minutos antes del cierre

CONSEJOS DEL CIRUJANO

1. Comience a preparar la pasta **genex** sólo cuando la zona quirúrgica esté preparada
2. Si el implante se realiza digitalmente, la pasta **genex** puede utilizarse después de finalizar la etapa 5
3. Una vez implantada, no altere la pasta **genex** mientras esté fraguando


genex ds

1

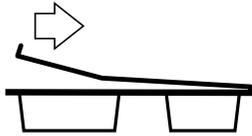


Abra el envase y saque todos los componentes utilizando una técnica aséptica de "no tocar"

2

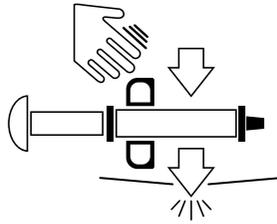


Sostenga la jeringuilla con el polvo horizontalmente, golpee suavemente sobre una superficie dura y a continuación retire el capuchón

3

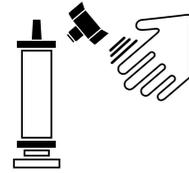


Sostenga la jeringuilla de líquido verticalmente y quite cuidadosamente el capuchón

4

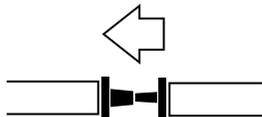


Atornille las jeringuillas juntas, e INMEDIATAMENTE inyecte el líquido en la jeringuilla con polvo - mantenga la presión para evitar el reflujo del líquido

5

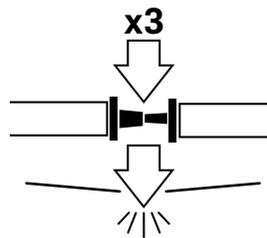

Mantenga la presión y golpee las jeringuillas tres veces sobre una superficie dura. Dé la vuelta a las jeringuillas y golpee tres veces (repita de nuevo)


6

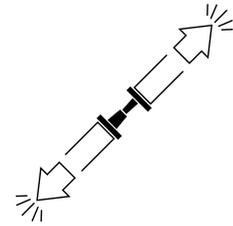

Ahora agite las jeringuillas CON VIGOR durante 30 segundos


7

SUAVEMENTE

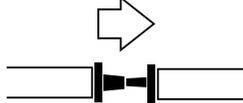


SUAVEMENTE transfiera una pequeña cantidad de la mezcla de la jeringuilla grande a la jeringuilla pequeña

8

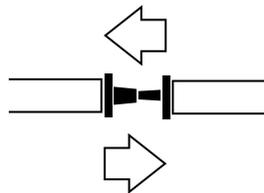

Trabaje los émbolos hacia adelante y hacia atrás con fuerza creciente hasta transferir la mezcla totalmente a la jeringuilla pequeña. Realice 2 transferencias más entre las jeringuillas para asegurar una mezcla consistente

9

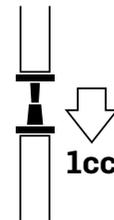

Pase la mezcla a la jeringuilla grande. Sostenga la jeringuilla verticalmente y tire del émbolo hacia atrás 1cc. Dé un golpecito a la jeringuilla con firmeza para sacar la pasta del cuello de la jeringuilla

10



Separe la jeringuilla pequeña y deshágase de ella. Atornille la punta de extensión de la jeringuilla. **genex ds está listo para usar**

11



5 MINUTOS

El injerto óseo **genex** es inyectable hasta 5 minutos desde la adición de la solución de mezcla. Permita que fragüe por lo menos 15 minutos antes del cierre

Siga las indicaciones y consulte las contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso.

©2017, Biocomposites y genex son marcas registradas de Biocomposites Ltd. Todos los derechos reservados. No está autorizada la copia, reproducción, distribución o reedición sin el permiso expreso y por escrito del propietario, Biocomposites Ltd.

Patentes concedidas: EP I390086 B1, US 8632796, CN ZL02809194.9, US 8496955.

MA0168RI